

MEDIA CORTA HASTA LA RODILLA JOBST RELIEF



Las medias cortas de compresión JOBST Relief proporcionan una compresión media para el tratamiento de varices, postoperatorios, edemas moderados entre otros. Buena relación/calidad precio para tratamientos circulatorios con problemas moderados.

[Saber Más](#)

Referencia: 6673

Precio: €29.50

Categorías: [MEDIAS Y CALCETINES DE COMPRESIÓN](#)

Descripción

Las medias cortas hasta la rodilla de compresión JOBST Relief están diseñadas para dar una compresión adecuada para el tratamiento postoperatorio de varices o en casos de piernas cansadas y doloridas. Gran confort en su uso diario debido a su estructura de hilado en 3D. Realizado con materiales elásticos y de buena calidad. El talón está reforzado para proporcionar una gran durabilidad al producto. Las medias de compresión JOBST Relief de Clase 2 (CCL2) están indicadas para los siguientes tratamientos: - Varicosis moderadas a severas - Postoperatorio - Edema moderado - Post-escleroterapia - Varices moderadas durante embarazo - Tromboflebitis superficial El modelo es de color beige y con la puntera abierta. Las medias de compresión se deberían poner al levantarse por la mañana y quitárselas por la noche antes de ir a dormir. Es importante escoger correctamente la talla de las medias para que el tratamiento sea el adecuado. Las medidas deben tomarse a primera hora de la mañana, cuando las piernas todavía no se han hinchado. Para las medias cortas tendremos que medir el perímetro del tobillo/ perímetro de la pantorrilla en cm. S: 18-21 cm/ 28-38 cm M: 21-29 cm/ 30-42 cm L: 25-29 cm/ 32-46 cm XL: 29-33 cm/ 34-50 cm